

## パワーブリーズ シェーカー

### \*【禁忌・禁止】


1. 個人の使用に限り、複数名で使用しないで下さい。
2. 医師に相談することなく、処方された薬剤または治療計画を変更しないで下さい。
3. 次の患者や以下の状態の方はご使用にならないで下さい。
  - ・気胸
  - ・重症結核
  - ・右心不全
  - ・咯血がある
4. 重度の心疾患をお持ちの方は、医師の指示のもと、ご使用下さい。
5. 使用中にめまいが生じた場合は、使用を中断し落ち着くまで鼻から静かに呼吸をして下さい。めまいが持続するか、他の問題が生じた際は速やかに使用を中止し、医師にご相談下さい。
6. 16 歳以下の方は、大人の監視下でのみご使用下さい。

### \*【形状・構造及び原理等】

#### <形状・構造>

モデル名	寸法(公差±5%)	重量(公差±5%)
① クラシック	40×60×140(mm)	66g
② デラックス	55×60×125(mm)	120g

#### ① クラシック

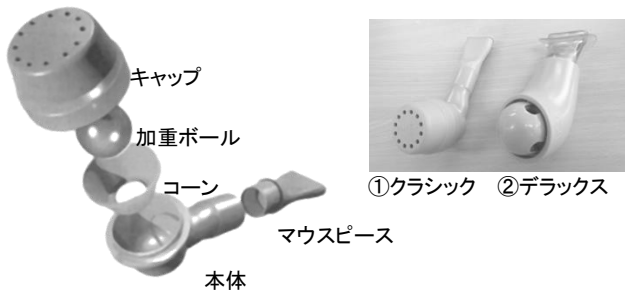

#### ② デラックス



本体カラー: ブルー

名称	機能
マウスピース	口に咥える部分。
本体	下部パーツ。呼吸が通過する。構造部を装着する。
コーン	加重ボールを呼吸経路の定位置に保持する。
加重ボール	自重により呼吸経路を閉鎖する。
キャップ	呼吸の排気孔を持つ。加重ボールの移動を制限する。

#### <原材料>

マウスピース : ポリプロピレン(クラシック)  
ラテックスフリーPVC(デラックス)  
本体 : ポリプロピレン  
コーン : ポリプロピレン  
加重ボール : 炭素鋼  
キャップ : ポリプロピレン

### \*【使用目的又は効果】

患者の気道に呼吸陽圧の振動刺激を与えて排痰を促進し、換気を改善させる訓練機器です。

### \*【使用方法等】

1. 本体を手にとって水平に保ちます。
2. マウスピースを唇で包み込むように咥えます。
3. マウスピースを咥えたままできるだけゆっくりと鼻から息を吸込みます。
4. ゆっくり時間をかけて息を吐き出します。
5. 同様の動作を 10～15 回繰り返します。

### \*【使用上の注意】

- ・肺の分泌物を移動することを目的として設計されています。それ以外の目的での使用はお勧めできません。
- ・診断、治療、または疾患の予防を目的とした機器ではありません。
- ・直射日光を避け、涼しい乾燥した場所に保管して下さい。
- ・衛生状態を維持するために密封されています。シールが破れている製品は使用しないで下さい。
- ・本品はオートクレーブ滅菌、EOG 滅菌、乾熱滅菌またはプラズマ滅菌はできません。

### \*【保守・点検に係る事項】

#### <洗浄・消毒方法>

1. マウスピースを取り外します。
2. キャップを回し、本体から加重ボールとコーンを取り出します。
3. 使用後はぬるま湯で洗浄します。週に 2-3 回は 10 分ほどぬるま湯に浸けた後、流水で洗い流して下さい。その後、柔らかい布でよく水分を拭き取り、清潔な場所で自然乾燥させます。ヒーターやドライヤーを使用しないで下さい。週 1 回は哺乳瓶用などの洗浄液に浸けて消毒することをおすすめします。
4. 分解した部品を組み立て、清潔な容器で保管して下さい。

### \*【包装】

本体一個単位で包装

### \*【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

#### <製造販売業者>

株式会社エントリージャパン  
住所: 〒160-0022 東京都新宿区新宿 6-12-5 新宿松喜ビル  
TEL:03-5362-3383

#### <製造業者>

POWERbreathe International Ltd.  
(パワーブリーズインターナショナルエルティエディー)  
英国

#### \*【販売業者】

