

パワーブリーズ シェーカー プラス

*【禁忌・禁止】

- 複数名で使用できますが、衛生上の理由によりオートクレーブ滅菌されていない本品においては他者との共有はできません。
- 医師に相談することなく、処方された薬剤または治療計画を変更しないで下さい。
- 次の患者や以下の状態の方はご使用にならないで下さい。
 - ・気胸
 - ・重症結核
 - ・右心不全
 - ・喀血がある
- 重度の心疾患をお持ちの方は、医師の指示のもと、ご使用下さい。
- 使用中にめまいが生じた場合は、使用を中断し落ち着くまで鼻から静かに呼吸をして下さい。めまいが持続するか、他の問題が生じた際は速やかに使用を中止し、医師にご相談下さい。
- 16歳以下の方は、大人の監視下でのみご使用下さい。

【形状、構造及び原理】

＜形状・構造＞



名称	機能
マウスピース	口に咥える部分。
本体	下部パーツ。呼吸が通過する。構造部を装着する。
コーン	加重ボールを呼吸経路の定位置に保持する。
加重ボール	自重により呼吸経路を閉鎖する。
キャップ	呼吸の排気孔を持つ。加重ボールの移動を制限する。

本体カラー:ホワイト

寸法・重量(公差±5%):55×60×125(mm)、98g

＜原材料＞

マウスピース	:ラテックスフリーPVC
本体	:ABS樹脂
コーン	:ABS樹脂
加重ボール	:炭素鋼
キャップ	:ABS樹脂

*【使用目的又は効果】

患者の気道に呼吸陽圧の振動刺激を与えて排痰を促進し、換気を改善させる訓練機器です。

【使用方法等】

- 本体を手にとって水平に保ちます。
- マウスピースを唇で包み込むように咥えます。
- マウスピースを咥えたままできるだけゆっくりと鼻から息を吸込みます。
- ゆっくり時間をかけて息を吐き出します。
- 同様の動作を10～15回繰り返します。

【使用上の注意】

- ・肺の分泌物を移動することを目的として設計されています。それ以外の目的での使用はお勧めできません。
- ・診断、治療、または疾患の予防を目的とした機器ではありません。
- ・直射日光を避け、涼しい乾燥した場所に保管して下さい。
- ・衛生状態を維持するために密封されています。シールが破れている製品は使用しないで下さい。
- ・本品はプラズマ滅菌、EOG 滅菌または乾熱滅菌はできません。

【保守・点検に係る事項】

＜消毒・殺菌方法＞

方法1 手洗淨

- ・キャップを回して分解し、加重ボールとコーンを取り出します。
- ・清潔なシンクに張った酵素系洗剤等の液に浸し、十分に洗淨します。洗淨後、水分が残らないよう柔らかい布でよく拭き取ります。
- ・脱イオン水または蒸留水で少なくとも3回すすぎ洗います。
- ・自然乾燥させます。ヒーターやドライヤーなどを使用しないでください。
- ・再組立てし、清潔な容器に保管します。

方法2 自動洗淨器

- ・キャップを回して分解し、加重ボールとコーンを取り出します。
- ・パーツを自動洗淨器の適切な場所に置き、次のような洗淨サイクルを実施します。
- ・約2分間の予備洗淨
- ・93℃で約3分間の洗剤洗淨
- ・完全に乾燥させるのに十分な乾燥サイクル実施
- ・再組立てし、清潔な容器に保管します。

オートクレーブ

方法1または方法2の洗淨後、134℃・1kg/m²の圧力で滅菌します。変形や機能喪失なしに10回の滅菌実施を行うことができます。(ただしPVCのマウスピースについては3回)

【包装】

本体一個単位で包装

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

＜製造販売業者＞

株式会社エントリージャパン

住所:〒160-0022 東京都新宿区新宿 6-12-5 新宿松喜ビル
TEL:03-5362-3383

＜製造業者＞

POWERbreathe International Ltd.

(パワーブリーズインターナショナルエルティイーディー)

英国

[販売業者]

