

パワーブリーズ製品の洗浄・消毒の手順

2019.8.

1. 概要

パワーブリーズKH2	パワーブリーズメディック	パワーブリーズメディックプラス
<p>各パーツの名称： ① KH2 本体（液体への浸漬不可） ② バルブヘッド ③ スペーサ（フィルタ-取付用器具） ④ マウスピース（個人用に限り使用）</p>  <p>注意：KH2 本体①は使用後にアルコールガーゼ等で表面を拭拭してください。</p>	<p>各パーツの名称： ① メディック本体 ② 筒部・目盛・負荷調整ノブ ③ ハンドルカバー ④ マウスピース（個人用に限り使用）</p> 	<p>各パーツの名称： ① メディックプラス本体 ② バルブ式 ③ ハンドルカバー ④ マウスピース（個人用に限り使用）</p> 

2. 洗浄・消毒方法

- 2.1 測定またはトレーニング終了後は各パーツを未消毒の器具として区別します。
KH2 本体は使用後にアルコールガーゼ等で表面を拭拭してください。
- 2.2 KH2 本体以外の未消毒の各パーツを温水に 10 分間漬けた後、流水で良く洗浄してください。洗浄後は水気を切ってください。
注意：KH2 本体を液体に浸漬させないでください。
- 2.3 感染が特に懸念される場合、1000ppm 相当の消毒液を作成し、各パーツを 30 分間以上浸漬して消毒してください。（通常使用は 100ppm 相当）
例 1）1 ℓの水にパワーブリーズ専用洗浄剤 5 錠を溶解する。
（通常使用は 2 ℓに 1 錠を溶解）
例 2）ミルトン 10 倍希釈液
（通常使用は 80 倍希釈）
- 2.4 流水でよく洗浄し、水気を取り除いてください。
- 2.5 清潔な場所で十分に乾燥させてから保管してください。



株式会社 エントリージャパン

〒160-0022
 東京都新宿区新宿 6-12-5 新宿松喜ビル
 Tel.03-5362-3383 Fax.03-5369-8330
 URL:www.entry-japan.com Mail:info@entry-japan.com